

ПАСПОРТ ВИРОБУ
(інструкція користувача)
ТРИМАЧ ОПОРНИИ (ГУСАК) МЕДОК МЕД•06-074



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ

Тримач опорний (гусак) MEDOK призначено для надання допомоги хворим та особам з інвалідністю під час переходу з положення лежачи в положення сидячи. Користування виробом показано в разі порушення функцій опорно-руховою апарату, післяопераційного стану й у літньому віці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри виробу, мм 660x980x2200

Маса, кг, не більш як 25

Максимальне навантаження на раму, кг, не більш як 100

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Тримач опорний (гусак) MEDOK, шт. 1

Паспорт, шт. 1

Кріплення (гвинт, шайба, гайка), шт. 2

КОНСТРУКЦІЯ

Виріб складається зі збірною металевим каркасом та мотузковим поручням.

Поручень можливо переставили в три різні положення з метою зміни висоти поручня від рівня підлоги

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Виріб встановлюють нижньою опорою під ліжко в такий спосіб, щоб пацієнт міг триматися за поручень під час підйому з ліжка.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією виробу перевірити надійність кріплення, правильність встановлення виробу, мотузкового поручня на ньому та цілісність виробу. Фірма-виробник не несе відповідальності за поломки та порушення правил безпеки під час експлуатації виробу, якщо є відхилення від вимог цього паспорта.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує надійну роботу виробу протягом 12 місяців із часу його придбання в разі дотримання споживачем правил експлуатації цього паспорта.

Претензії за гарантією втрачають свою силу в разі:

1. Закінчення гарантійного терміну;
2. Недбалої або неправильної експлуатації та збереження;
3. Відсутності паспорта виробу

Можливі інші модифікації виробу, що поліпшують його якість.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Умови зберігання: зберігати в сухому місці за температури від +5 до +3 °С, якомога далі від джерела тепла, прямого сонячного світла та пилу.

Дату виготовлення та номер партії вказано на виробі.